

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Egyensúly párnák

Cikkszám: YPS-K*-1M

K* - szín



Rendeltetés szerű használat

Az eszköz célja az izomcsoportok erősítése, amelyek poszttraumás vagy műtét utáni immobilizáció következtében legyengültek, továbbá használható a boka- és térdízület stabilizálásának terápiájában, valamint a gerinc instabilitásának korrigálásában és stabilizálásában.

Maximális használati időtartam

- A termék folyamatos használata nem haladhatja meg a 8 órát.

Az eszköz használatra való előkészítése

- Vedd ki a párnát a csomagolásból.

Használati utasítás

1. Fújd fel a párnát a megfelelő magasságra.
2. Végezze el az ajánlott gyakorlatokat ülő vagy álló helyzetben.
3. Szükség esetén pumpáld fel újra.

Megjegyzések és figyelmeztetések

- Első használat előtt konzultálj szakemberrel.
- Külső használatra szánt eszköz.
- Újra felhasználható eszköz.
- Nem steril, sérült bőrön ne használd.
- Allergiás tünetek vagy bőrirritáció esetén az eszköz használatát abba kell hagyni.
- Sérült eszközt ne használj.
- Ne használd az eszközt a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után.

Az alábbi esetek nem képezhetik reklamáció alapját:

- Az eszköz természetes elöregedése.
- Az eszköz túlzott igénybevételből vagy fizikai túlterhelésből eredő kopása.

Különleges tárolási vagy kezelési feltételek:

- Az eszköz élettartama a gyártástól számítva 3 év.
- Tárold a csomagoláson feltüntetett feltételek szerint:
 - hőmérséklet: 10°C - 40°C,
 - páratartalom: <85%.

Ártalmatlanítás

- A használt eszköz potenciális biológiai veszélyforrás lehet. A készüléket a helyi egészségügyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Minden, az eszközzel kapcsolatos súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és az illetékes tagállami hatóságnak.

Gyártó:



ZARYS International Group
sp. z o.o. sp.k.
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze, Poland
www.zarys.pl

Forgalmazó:

&DESIGNSTUDIO

SINCE 1989.

& Design Studio Kft.
1116 Budapest, Sztregova utca 4. Fsz.1
Magyarország
www.equipack.hu

Rev. 01 20.10.2023

SYMBOL

Szimbólum
megnevezése



Cikkszám



CE-jelölés



Orvostechnikai
eszköz



Nem steril



Nem tartalmaz
természetes
gumilatecet



Olvasd el a használati
útmutatót



Felhasználható



Gyártási tételszám



Óvd a napfénytől



Tartsd szárazon



Hőmérsékleti határ



Páratartalom-határ



Vegyes anyag



Csomagolási egység



Gyártó



Gyártási dátum