

Használati utasítás

Egyensúlyozó párna - 34 cm

REF: YPS-X-1M; YPS-B-1M; YPS-P-1M

Célzott használat

- A poszttraumás és műtét utáni immobilizáció következtében meggyengült izomcsoportok erejének javítására, valamint a boka- és térdízület stabilizálásának terápiájában, illetve a gerinc tartásának és stabilizálásának korrekciójában való felhasználásra tervezett termék.

Maximális használati idő

- A készülék folyamatos használata nem haladhatja meg a 8 órát.

A termék előkészítése használatra

- Vegye ki a párnát a csomagolásból.

Alkalmazási útmutató

- Fújja fel a párnát a megfelelő magasságig
- Végezze el az ajánlott gyakorlatokat ülő vagy álló helyzetben.
- Szükség esetén pumpálja fel.
-

Termékjegyzetek és figyelmeztetések

- Az első használat előtt konzultáljon szakemberrel.
- Külső használatra szánt termék.
- Újra felhasználható termék.
- Nem steril termék, sérült bőrön ne használja.
- Allergiás tünetek vagy bőrirritáció esetén hagyja abba a termék használatát.
- Ne használja, ha a termék sérült
- Ne használja a terméket a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után..

Reklamációkra nem érvényesek:

- A termék természetes öregedése.
- A termék túlzott használatból vagy fizikai túlterhelésből eredő elhasználódása.

Különleges tárolási vagy kezelési feltételek

- A termék eltarthatósági ideje a gyártástól számított 3 év.
- A termék csomagolásán feltüntetett körülmények között kell tárolni: hőmérséklet: -10°C - 40°C, páratartalom: < 85%.

Megsemmisítés/Hulladékkezelés

A használt termékek potenciálisan biológiailag veszélyesek lehetnek. A helyi egészségügyi hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Gyártó:



Forgalmazó:

& Design Studio Kft.
Budapest, 1116 Sztregova utca 4 Fsz.1
www.equipack.hu
info@equipack.hu

